

# 検査精度を上げて、省力化。

検査数値の高い安定性を確保。もう面倒な氷の準備はいりません。

# キューブクーラー<sup>®</sup>

(採血管冷却保冷容器)

新登場

特許出願済み



急速冷却!

採血管  
20本収納!  
(5mL管、7mL管対応)

長時間保冷!

軽くて  
コンパクト!



フォルテ グロウ メディカル 株式会社

# キューブクーラー®


# 製品特性

(採血管冷却保冷容器) 特許出願済み




## 採血管冷却効果

採血管に37℃の水5mLを入れ、種々の条件で冷却した場合の温度変化を記録。キューブクーラー®、市販品については、採血管挿入部位のばらつきを評価するために外側と内側の2箇所の温度を測定。  
※市販品はプラスチック製容器を使用。

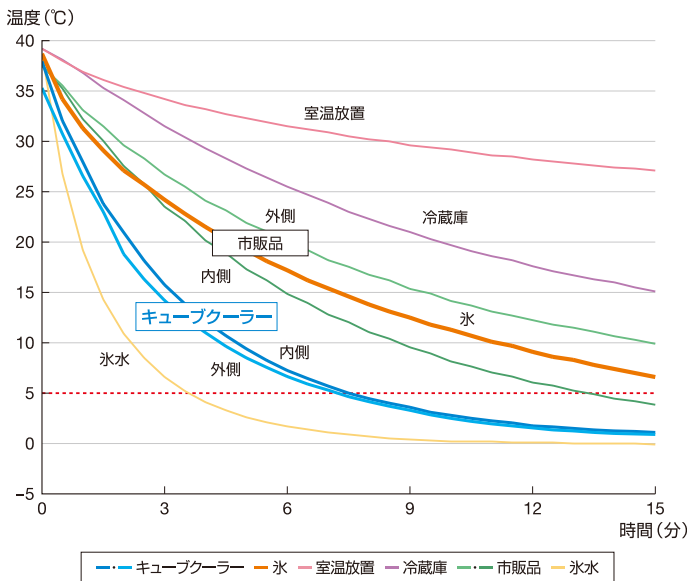

## 採血管保冷持続効果

採血管に37℃の水5mLを入れ、キューブクーラー®、市販品で冷却した場合の保冷持続時間を評価。それぞれ、挿入部位によるばらつきを評価するために外側と内側の2箇所の温度を測定。

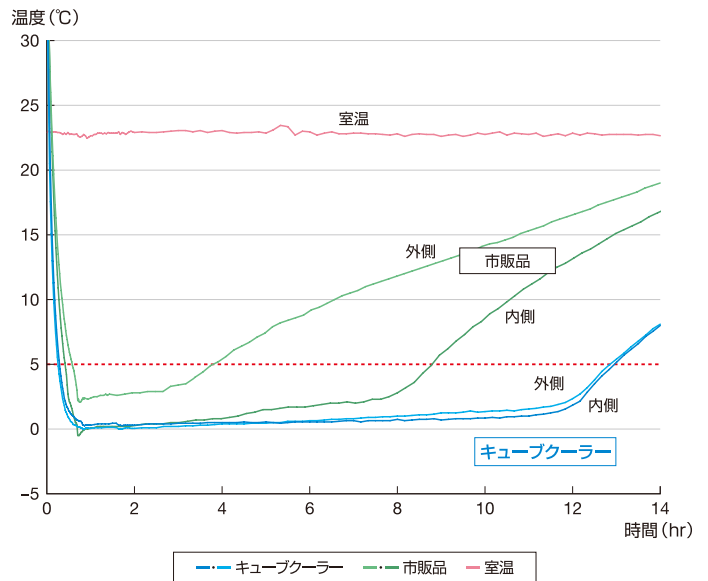

**キューブクーラー®は、採血管の挿入部位の違いによる温度差がなく、氷水に近い冷却速度を達成します**

**キューブクーラー®は、採血管の挿入部位の違いによる温度差がなく、長時間保冷を実現します**

※上記のデータは、出荷時のものです。  
※使用環境によって、保冷持続時間は多少前後します。

カタログNo	寸法(mm)	重量(g)	対応採血管	収納本数	入数
CUBE-T20型	150×180×170	約1,400	5mL管、7mL管	20	1

※ご使用前に必ず取り扱い説明書をご一読下さい。  
 ※本製品は医療機器ではありません。  
 ※本製品はご使用前に約-20℃設定の冷凍庫で予備冷却をする必要があります。  
 ※本製品の仕様及び関連資料その他は、予告なく変更する場合があります。  
 ※冷凍庫は、株式会社カノウ冷機(神奈川県)において販売しております。お求めの際は下記までお問い合わせください。  
 Tel:042-777-8118 Fax:042-777-8119 Mail:info@kanoureiki.com http://www.kanoureiki.com/

## 販売元

**FGM** フォルテ グロウ メディカル 株式会社

〒327-0003 栃木県佐野市大橋町1647番地  
Tel:0283-22-2801 Fax:0283-21-1277 <http://www.fgm.co.jp/>

## 東京営業所 営業部

〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町4-19 榎本ビル  
Tel:03-3863-1901 Fax:03-3863-1905

製造元:唐澤化成株式会社 〒327-0003 佐野市大橋町1647-1  
開発協力:味の素株式会社

## 取扱店