

検査精度を上げて、省力化。

検査数値の高い安定性を確保。もう面倒な氷の準備はいりません。

キューブクーラー[®]

(採血管冷却保冷容器)

好評発売中

特許出願中



急速冷却!

採血管
20本収納!
(5mL管、7mL管対応)

長時間保冷!

軽くて
コンパクト!



フォルテ グロウ メディカル 株式会社

キューブクーラー®


製品特性

(採血管冷却保冷容器) 特許出願中



採血管冷却効果

採血管に37℃の水5mLを入れ、種々の条件で冷却した場合の温度変化を記録。キューブクーラー®、市販品については、採血管挿入部位のばらつきを評価するために外側と内側の2箇所の温度を測定。
※市販品はプラスチック製容器を使用。

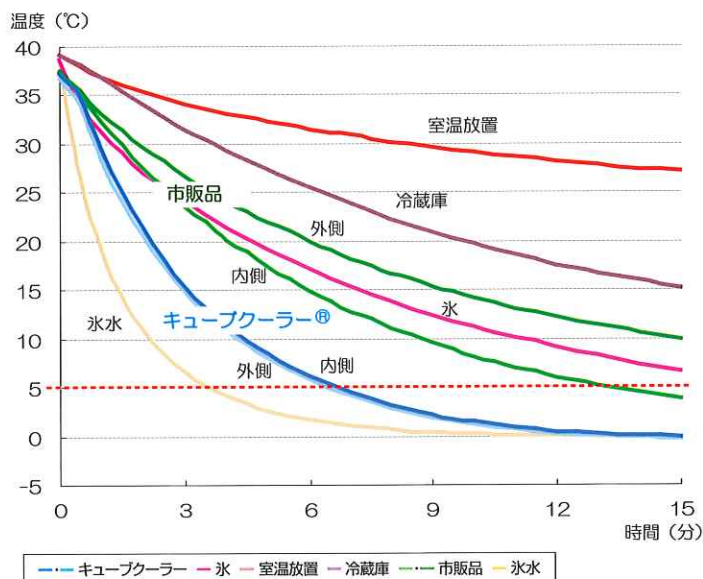


キューブクーラー® は、採血管の挿入部位の違いによる温度差がなく、氷水に近い冷却速度を達成します

※上記のデータは、出荷時のものです。
※使用環境によって、保冷持続時間は多少前後します。

採血管保冷持続効果

採血管に37℃の水5mLを入れ、キューブクーラー®、市販品で冷却した場合の保冷持続時間を評価。それぞれ、挿入部位によるばらつきを評価するために外側と内側の2箇所の温度を測定。

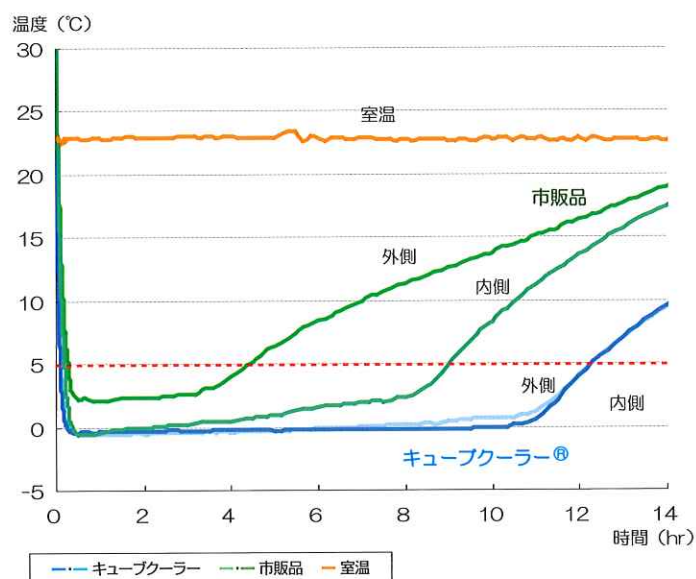

キューブクーラー® は、採血管の挿入部位の違いによる温度差がなく、長時間保冷を実現します

カタログNo	寸法(mm)	重量(g)	対応採血管	収納本数	入数
CUBE-T20型	150×180×170	約1,500	5mL管、7mL管	20	1

※ご使用前に必ず取り扱い説明書をご一読下さい。
 ※本製品は医療機器ではありません。
 ※本製品はご使用前に約-20℃設定の冷凍庫で予備冷却をする必要があります。
 ※本製品の仕様及び関連資料その他は、予告なく変更する場合があります。
 ※プラスチック容器、断熱容器、金属容器は部品販売しております。
 ※冷凍庫は、株式会社カノウ冷機(神奈川県)において販売しております。お求めの際は下記までお問い合わせください。
 Tel:042-777-8118 Fax:042-777-8119 Mail:info@kanoureiki.com <http://www.kanoureiki.com/>

製造販売元

FGM フォルテ グロウ メディカル 株式会社

〒327-0003 栃木県佐野市大橋町1647
 Tel.0283-22-2801 Fax.0283-21-2558 <http://www.fgm.co.jp/>

東京営業所 営業部(お問い合わせ)

〒101-0026 東京都千代田区神田佐久間河岸51 第一スレートビル5階
 Tel:03-3863-1901 Fax:03-3863-1905

開発協力: 味の素株式会社

取扱店