

機械器具 51 医療用嘴管及び体液誘導管  
管理医療機器 輸血・カテーテル用延長チューブ 12170012

## エクステンションチューブF


### 再使用禁止

#### 【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

#### 【形状・構造及び原理等】

<本品の代表図>

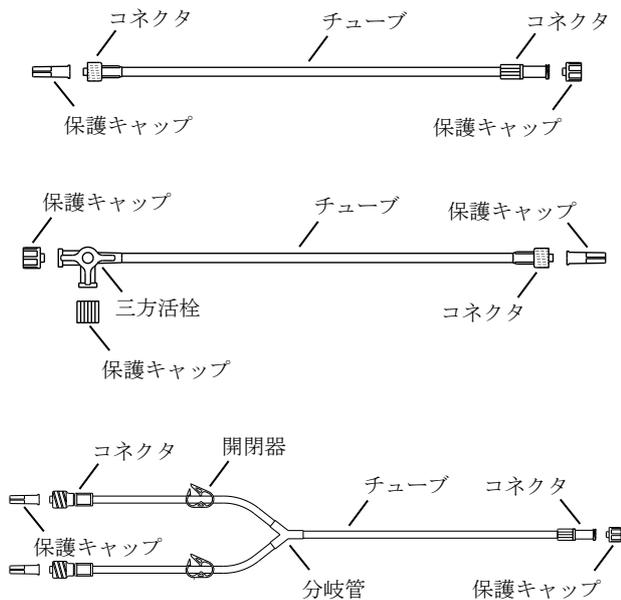

<主な原材料>

コネクタ：ポリカーボネート、ポリ塩化ビニル、メチルメタクリレートアクリロニトリルブタジエンスチレン共重合体

チューブ：ポリ塩化ビニル、ポリブタジエン

分岐管：ポリ塩化ビニル

三方活栓：ポリカーボネート、ポリエチレン、ポリプロピレン

- ・本品はポリ塩化ビニル（可塑剤：フタル酸ジ-2-エチルヘキシル）を使用している。

#### 【使用目的又は効果】

本品は、輸液、輸血、採血、採液、造影剤投与（150kPaを超えるものを除く）、ポンプ式輸液等のラインを延長するために用いる。

#### 【使用方法等】

1. 汚染に十分注意し、包装内から取り出す。
2. キャップの付いている製品については、キャップを取り外す。
3. 接続する輸液セット等を確実に接続する。
4. 三方活栓付の場合には、使用目的に合わせてコックを回転させ、流路を切り替えて使用する。

#### 【使用方法等に関連する使用上の注意】

- 1) 包装から取り出す際や、接続する際には、汚染に十分注意すること。
- 2) テーパー部に薬液を付着させないこと。[嵌合部に緩み等が生じる可能性がある。]

#### 【使用上の注意】

##### 【重要な基本的注意】

- 1) 150kPaを超える圧力で使用しないこと。[破損するおそれがある。]
- 2) 使用中は本品の破損、接合部のゆるみ及び薬液漏れ等について、定期的に確認すること。
- 3) 脂肪乳剤及び脂肪乳剤を含む医薬品、ヒマシ油等の油性成分、界面活性剤又はアルコール等の溶解補助剤などを含む医薬品を投与する場合及びアルコールを含む消毒剤を使用する場合は、三方活栓及びコネクタのひび割れについて注意すること。  
[薬液により三方活栓及び延長チューブ等のメスコネクタにひび割れが生じ、血液及び薬液漏れ、空気混入等の可能性がある。特に、全身麻酔剤、昇圧剤、抗悪性腫瘍剤及び免疫抑制剤等の投与では、必要な投与量が確保されず患者への重篤な影響が生じる可能性がある。なお、ライン交換時の締め直し、過度な締め付け及び増し締め等は、ひび割れの発生を助長する要因となる。]
- 4) ひび割れが確認された場合は、直ちに新しい製品と交換すること。
- 5) 脂溶性の医薬品等ではポリ塩化ビニルの可塑剤であるフタル酸ジ-2-エチルヘキシルが溶出する恐れがあるので、注意すること。
- 6) 使用中に液漏れ、つまり等の異常が認められた場合は、使用を中止し新しい製品と交換すること。
- 7) チューブが折れ曲げられたり、引っ張られた状態で使用しないこと。[チューブ結合部等の破損、外れが生じる可能性がある。]

#### 【保管方法及び有効期間等】

##### 【保管方法】

水濡れに注意し、高温、多湿、直射日光を避けて保管すること。

##### 【使用期限】

包装（ラベル）に使用期限を表示している。[自己認証による]

#### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

##### 【製造販売元】

フォルテ グロウ メディカル 株式会社

電話番号：0283-22-2801