



造影用耐圧チューブ CT用エクステンションチューブ

～ショートタイプ～

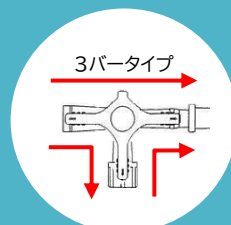

コック/バーのある位置が
開放となる

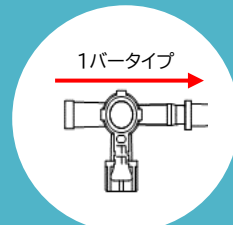

コック/バーのある位置が
閉鎖となる



プライミングキャップ

◇ 製品特長

- ・造影検査時のルート確保用として、短いチューブ長の造影用耐圧チューブです
- ・チューブ長250mmの製品は、三方活栓のコック/バーが3タイプから選べます
(1バータイプ/1バータイプ 赤コック/3バータイプ)
- ・プライミングキャップにより液垂れを防止し、コネクタ回りを清潔に保ちます

【プライミング方法】



STEP①

キャップ先端を上向きにセットして送液し、
チューブ内のエア抜きを開始します。

≫ ≫



STEP②

フィルターに液面が達すると、バックプレッシャーが
生じるので、プライミング完了の目安となります。

【プライミングキャップ製品の取扱時の注意】

- ・キャップを下向きでプライミングを行うと、液面でフィルターが塞がり、チューブ内の空気が抜け切れない恐れがあります。
- ・キャップ内が液で満たされた状態で、更に強い力で送液を行なうと、フィルターから液が放出したり、**キャップが破損する恐れがあります**のでご注意ください。

仕 様

型 式	内径×外径 (mm)	長さ (mm)	内容量 (mℓ)	三方活栓 コック	耐圧性能	梱包単位	JANコード
FGM-CTX- 80-1B	1.5×3.0	80	0.1	1バー	1.47Mpa (213psi)	50本／箱×4 (200本／ケース)	4547319471696
FGM-CTX- 250-1B		250	0.4				1バー (赤コック)
FGM-CTX- 250-1BP				4547319471641			
FGM-CTXR-250-1BP				4547319471313			
FGM-CTX- 250-3BP(S)				3バー	1.31Mpa (190psi)		

一般的名称:造影用耐圧チューブ
販 売 名:CT用エクステンションチューブ
認 証 番 号:302AABZX00018000

- 使用上の注意事項
- 1)ご使用前に必ず添付文書をご一読ください。
 - 2)包装が破損、汚損している場合や製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないでください。
 - 3)水ぬれに注意し、直射日光を避け、高温多湿の場所には保管しないでください。
 - 4)本製品は医療用 Disposable 製品です。1回限りの使用にしてください。
 - 5)形状および仕様は予告なく変更する場合があります。

製造販売元

フォルテ グロウ メディカル 株式会社

本 社 栃木県佐野市大橋町1647番地

販売元



ORTメディカル株式会社

本社営業所 神奈川県横浜市港北区新横浜2-7-19竹生第2ビル9F
TEL:045-534-7015 FAX:045-534-7760
大阪営業所 TEL:06-6476-7300 FAX:06-6476-7289
<https://www.ort-medical.jp/>