


造影用耐圧チューブ

CT用エクステンションチューブ

医療機器認証番号 302AABZX00018000

クリーンでスピーディーな造影検査をサポート

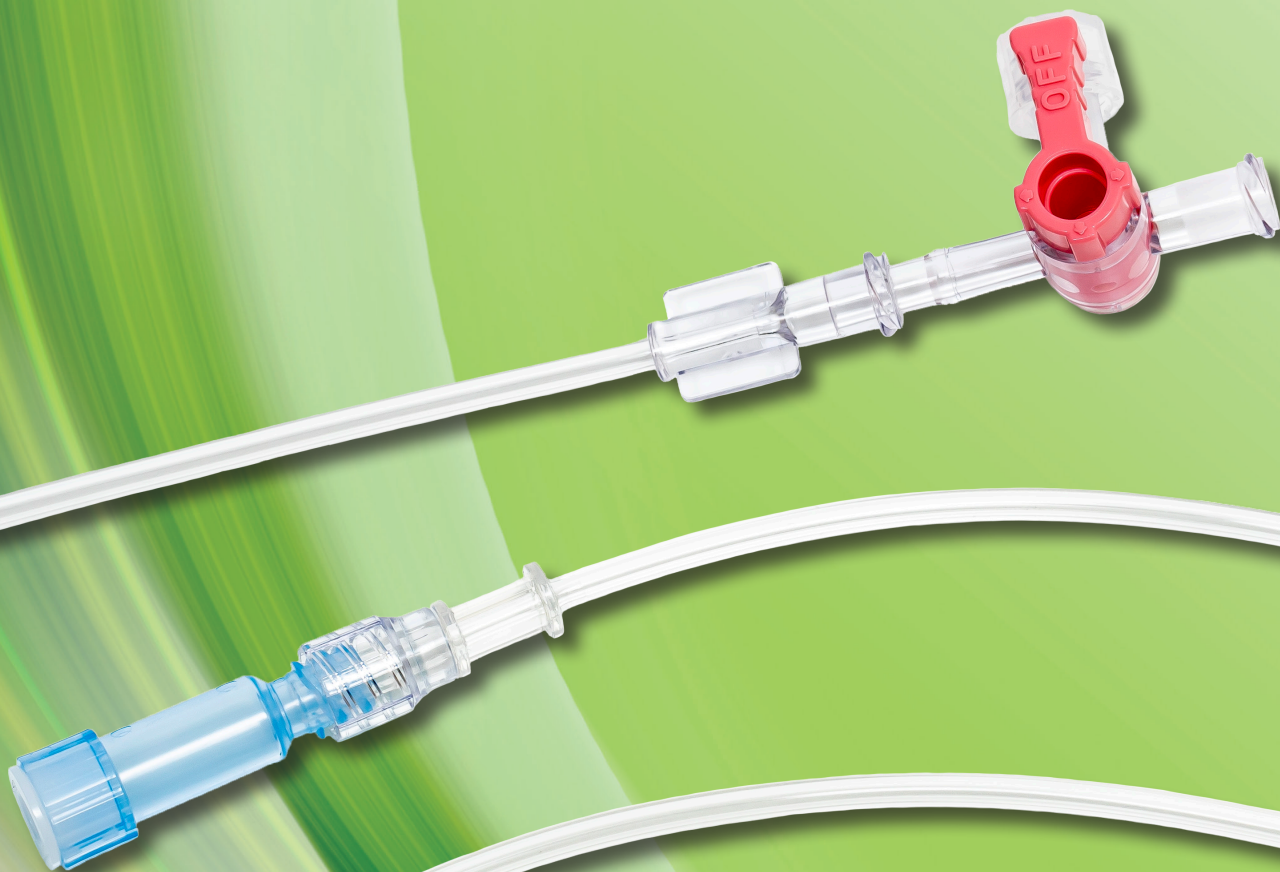

プライミングキャップ

新発想のキャップ構造により、プライミング時の液垂れを防止し、コネクタ回りを清潔に保ちます。



クリアチューブ

透明なチューブで、気泡の視認性に優れます。また検査時の取扱が容易な、柔軟性の高いチューブです。

耐圧性能
1.47MPa
(213psi)

■ プライミング方法



STEP①

キャップ先端を上向きにセットして、薬液を注入しライン内のエア抜きをします。



STEP②

キャップ内に薬液が入ったら、プライミング完了です。穿刺針等と接続する際は、キャップを外してご使用下さい。

キャップから薬液が漏れることなく、衛生的な取り扱いが可能です

【取り扱い時の注意】

- キャップを下向きにしてプライミングを行うと、スムーズにエアが抜けません。
- キャップ内に液で満たされた状態で、更に強い力で送液を行なうと、フィルターから液が放出したり、キャップが破損する恐れがありますのでご注意ください。

■ 仕様

CT用エクステンションチューブ 三方活栓付き

型 式	内径×外径 [mm]	長さ [mm]	内容量 [mL]	耐圧性能	梱包単位	JANコード
FGM-CTX- 250-1BP	1.5×3.0	250	0.4	1.47MPa (213psi)	50本/箱×4 (200本/ケース)	4547319471641
FGM-CTX- 600-1BP		600	1.1			4547319471689
FGM-CTX-1000-1BP		1000	1.8			4547319471542
FGM-CTXG-1000-1BP		1000	1.8			4547319472310
FGM-CTX-1300-1BP		1300	2.3			4547319471566
FGM-CTX-1500-1BP	2.2×3.8	1500	2.7	1.47MPa (213psi)	50本/箱×4 (200本/ケース)	4547319471580
FGM-CTX2- 600-1BP		600	2.3			4547319471665
FGM-CTX2-1000-1BP		1000	3.8			4547319471603
FGM-CTX2-1500-1BP		1500	5.7			4547319471627

CT用エクステンションチューブ 三方活栓付き 赤コック

型 式	内径×外径 [mm]	長さ [mm]	内容量 [mL]	耐圧性能	梱包単位	JANコード
FGM-CTXR- 250-1BP	1.5×3.0	250	0.4	1.47MPa (213psi)	50本/箱×4 (200本/ケース)	4547319472136
FGM-CTXR-1000-1BP		1000	1.8			4547319472150
FGM-CTXR-1500-1BP		1500	2.7			4547319472167
FGM-CTX2R-1000-1BP	2.2×3.8	1000	3.8	1.47MPa (213psi)	50本/箱×4 (200本/ケース)	4547319470873

CT用エクステンションチューブ 三方活栓なし

型 式	内径×外径 [mm]	長さ [mm]	内容量 [mL]	耐圧性能	梱包単位	JANコード
FGM-CT- 600P	1.5×3.0	600	1.1	1.47MPa (213psi)	50本/箱×4 (200本/ケース)	4547319471528
FGM-CT-1000P		1000	1.8			4547319471481
FGM-CT- 600FM2P	2.2×3.8	600	2.3	1.47MPa (213psi)	50本/箱×4 (200本/ケース)	4547319471511
FGM-CT-1000FM2P		1000	3.8			4547319471474

一般的名称：造影用耐圧チューブ
販 売 名：CT用エクステンションチューブ
認 証 番 号：302AABZX00018000

注意上の注意事項

- 1) ご使用前に必ず添付文書をご一読ください。
- 2) 包装が破損、汚損している場合や製品に破損等の異常が認められる場合は使用しないでください。
- 3) 水ぬれに注意し、直射日光を避け、高温多湿の場所には保管しないでください。
- 4) 本製品は医療用ディスポーザブル製品です。1回限りの使用にしてください。
- 5) 形状および仕様は予告なく変更する場合があります。

製造販売元

フォルテ グロウ メディカル 株式会社

本 社 栃木県佐野市大橋町1647番地

販売元



ORTメディカル株式会社

本社営業所 神奈川県横浜市港北区新横浜2-7-19竹生第2ビル9F
TEL:045-534-7015 FAX:045-534-7760
大阪営業所 TEL:06-6476-7300 FAX:06-6476-7289
<https://www.ort-medical.jp/>